



| | |
|---|--|
| שם הנוהל: הנחיות כלליות להכנת חומר ניגוד בהזרקה | מס' הנוהל: DIMUT-כללי-004-01 |
| הופק ע"י: אגף דימות כללי- תרופות שותפי כתיבה ועדכון: גריגורי מוזיקנסקי תאריך הוצאה: ספטמבר 2012 תאריך עדכון: מאי 2013 | אושר על ידי: פרופ' אלי קונן תאריך: מאי 2013 |

הנוהל: הנחיות להכנת חומר ניגוד בהזרקה

בכל הכנה של מערכת המזרק האוטומטי להזרקת חומר ניגוד בתחילת יום עבודה ובכל החלפה של החומר במהלך יום העבודה :

הרנטגנאי המכין את המערכת ידביק מדבקה עם שם החומר והמינון, התאריך, שעה, שם הרנטגנאי על גבי:

- שקיות ה- 0.9% Nacl לשטיפה
- בצמוד לבוכנה של המזרק האוטומטי
- על הצנרת שמתחברת למערכת ההזרקה האוטומטית (תאריך ושעה בלבד)

המערכת מוחלפת מידי בוקר.

בין נבדק לנבדק יש להחליף את הצינור (עם שסתום חד כיווני) המחבר בין החולה למזרק, באופן סטרילי.

בכל החלפה של בקבוק עם חומר ניגוד יש להדביק מדבקה הכוללת את הפרטים.